

new + care[®]

supplements

Oogdruppels

bij geïrriteerde, droge of vermoeide ogen

Oogdruppels met Dexpanthenol

Deze oogdruppel op basis van dexpanthenol is een steriele, visceuze, voedzame en bevochtigende vloeistof geschikt voor geïrriteerde en droge ogen.

Toepassing:

Wanneer u last heeft van symptomen zoals droge of vermoeide ogen, kunnen deze oogdruppels het gevoel van ongemak verminderen. Dit ongemak kan veroorzaakt worden door externe factoren zoals:

- Het dragen van contactlenzen;
- Langdurig naar een scherm kijken;
- Langdurig autorijden;
- Airconditioning.

Samenstelling:

COSMOCIL 0,0001%, DEXPANTHENOL 2%, HPMC 0,5%, NATRIUM CHLORIDE, EDTA, FOSFAAT BUFFER, GEZUIVERD WATER.

Voorzorgsmaatregelen en gebruiksinstructies

Was en droog uw handen.

Niet gebruiken indien de garantiesluiting verbroken is voor het eerste gebruik.

Breek de garantiesluiting door de dop van de fles te draaien.

Verwijder de dop van de fles en buig uw hoofd achterover.

Gebruik uw duim en wijsvinger om één oog open te houden.

Druk voorzichtig een of twee druppels in ieder oog en knipper 2 tot 3 keer.

Herhaal het proces in uw andere oog.

Knipper een aantal keer met uw ogen, zodat de oogdruppels zich verspreiden in uw oog.


Raak de druppelaar niet aan.

Sluit de fles direct na gebruik.

De oogdruppels kunnen direct voor het inbrengen op contactlenzen worden aangebracht.

Knipper daarna een aantal keer met uw ogen, zodat de druppels zich in het oog kunnen verspreiden.

Knip wanneer nodig voorzichtig één of twee druppels in elk oog, tot maximaal 4 keer per dag.

 Melleleson Pharma B.V.
Minervum 7384
NL-4817 ZH Breda

O2REFM0707-11
07/2024

STERILE A

CE 0344

MD

4°C 25°C



Bewaarcondities

Na openen 2 maanden houdbaar.

Buiten bereik van kinderen houden (zie afbeelding A).

Sluit de fles direct na gebruik.

Waarschuwingen en contra-indicaties

Niet gebruiken indien u allergisch bent voor één van de ingrediënten.

Niet gebruiken als u last heeft van een ooginfectie.

Stak het gebruik van dit product indien de mate van oogirritatie toeneemt of als u direct na het aanbrengen andere ongemakken ervaart, zoals pijn of een brandend gevoel en raadpleeg uw arts.

Niet gebruiken in combinatie met andere oog medicatie.

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd (zie afbeelding B).

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

Door de viscositeit verhogende ingrediënten dient er na het aanbrengen van de druppels rekening te worden gehouden met tijdelijke verandering van het gezichtsvermogen.

Niet meer dan 4 keer per dag gebruiken.

Stop het gebruik van dit product en informeer de fabrikant en de nationale gezondheidsautoriteiten wanneer u een ernstig gezondheidsprobleem ervaart in verband met dit medisch hulpmiddel.

De New Care Advieslijn, een persoonlijk advies

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat je vragen hebt over het behoud van je gezondheid en het gebruik van onze producten. Neem voor een persoonlijk antwoord op al je vragen contact op met onze advieslijn. De New Care Advieslijn is bereikbaar per telefoon (085 222 0018) en per email (advieslijn@new-care.nl). Onze orthomoleculair therapeut adviseert je graag.